



www.barry-care.com

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кресла-коляски предназначены для передвижения людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.

Barry K4

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ



Содержание

Содержание	2
Введение	3
Ответственность	3
Условия использования	4
Упаковка	4
Технические характеристики	5
Подготовка кресел-колясок к использованию	6
Меры предосторожности при использовании	7
Техническое обслуживание, уход за изделием и дезинфекция	8
Транспортировка, хранение и утилизация	9
Условия гарантии	10

Уважаемый Клиент,

Благодарим Вас за Ваш выбор и приобретение кресла-коляски Barry. Данное кресло-коляска обеспечит Вам комфортное и безопасное передвижение. Мы гарантируем высокое качество выбранного Вами Изделия, сочетающего в себе современную функциональность и надежность. Перед использованием кресла-коляски обязательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. В нем содержится вся информация о функциях, необходимых для ежедневного применения кресел-колясок Barry. Желаем Вам комфортной и безопасной эксплуатации Изделия.

Ответственность

Изготовитель рекомендует использовать Изделие и осуществлять уход за ним в соответствии с (его) руководством по эксплуатации.

Изготовитель несет ответственность по гарантийным обязательствам только в том случае, если Изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения Изделия, полученные в результате его неправильного использования, проведения ремонтных работ не в специализированных сервисных центрах или применения в Изделии запасных частей и компонентов, не предусмотренных Изготовителем. Работы по ремонту и гарантийному обслуживанию Изделия могут выполняться только в специализированных мастерских или непосредственно Изготовителем.

Назначение

Кресла-коляски Barry предназначены для передвижения людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.

Кресла-коляски Barry пригодны для многократного применения. При использовании другим пациентом кресло-коляску необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию его состояния.

Описание принципов работы

Кресла-коляски Barry приводятся в движение вручную и служат для передвижения пациента с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающего его лица. Кресла-коляски Barry должны соответствовать состоянию здоровья пользователя.

Упаковка

В комплект с кресло-коляской входят:

- Кресло-коляска
- Подножки
- Капюшон
- Подушка для сиденья
- Подголовник

Barry K4



- Складное кресло-коляска.
- Материал рамы: алюминий.
- Обивка Изделия: нейлон.
- Съёмная подножка, регулируемая по высоте.
- Съёмный подголовник и капюшон.
- Регулировка угла наклона спинки в трех положениях.

Технические характеристики

Ширина сиденья	30 см и 36 см
Ширина Изделия	Ширина сиденья +10 см
Высота спинки	70±3 см
Высота Изделия	105±3 см
Макс. нагрузка	60 кг
Вес	12 ±1кг

Порядок работы

1. Распаковка

Коляска поставляется в готовом для эксплуатации состоянии. Перед распаковкой проверьте целостность транспортной упаковки. При обнаружении серьезных повреждений на упаковке внимательно осмотрите саму коляску или при необходимости обратитесь к продавцу. Аккуратно распакуйте и извлеките коляску из упаковки (При необходимости упаковка может быть повторно использована для последующего хранения и транспортировки). После распаковки внимательно проверьте наличие входящего в комплект дополнительного оборудования, целостность коляски и дополнительного навесного оборудования.

2. Сборка

Кресла-коляски легко складываются и раскладываются без применения специальных инструментов.

- Извлеките коляску из упаковки.
- Поставьте коляску и разложите, потянув передние ножки вперед, а задние назад.
- Надавите на сиденье, чтобы бортики сиденья вошли в пазы.
- Зафиксируйте коляску потянув вниз поперечную планку под сиденьем и вверх нижнюю поперечную планку под подножкой .
- Надавите на поперечную планку позади спинки коляски.
- Установите подголовник так, чтобы фиксаторы показались снаружи.
- Установите подушку на сиденье.
- Установите подножку на удобном уровне.
- Установите капюшон на специальных крепежах на раме рядом с подголовником.

3. Разборка/складывание коляски

- Снимите подножки, подголовник и подушку.
- Выньте бортики сиденья из пазов предварительно повернув фиксаторы по бокам сиденья.
- Потяните вверх поперечную планку позади спинки коляски

- Потяните вверх верхнюю поперечную планку под сиденьем и вниз нижнюю поперечную планку под подножкой .
- Соедините передние и задние ножки коляски.

Меры предосторожности при использовании

- Не пытайтесь поднимать предметы с пола, наклоняясь между коленями.
 - Не наклоняйтесь над верхним краем спинки, чтобы достать до предметов, находящихся позади Вас: это может привести к опрокидыванию коляски.
 - Стояночные тормоза используются только после остановки коляски: ни в коем случае не применяйте их для снижения скорости коляски или в качестве опоры при пересадке.
 - При преодолении повседневных препятствий (ступенек, порогов) нужно расположить задние колеса коляски по направлению движения.
 - Сопровождающим лицам не следует поднимать коляску, держа за съемные части.
 - При подъеме или спуске по наклонным поверхностям сопровождающему лицу следует придерживать коляску за ручки.
 - Не оставляйте коляску на наклонных поверхностях.
 - При посадке или высадке в/из кресла-коляски Barry следует поставить Изделие на стояночные тормоза.
 - При начале использования коляски избегайте резких движений и толчков.
 - Во избежание травм берегите пальцы от подвижных деталей.

Техническое обслуживание

Работоспособность кресел-колясок должна проверяться каждый раз перед началом использования. При обнаружении неисправностей просьба незамедлительно обратиться в специализированный сервисный центр с целью их устранения. Особенно это касается случаев, когда изменяются ходовые качества Изделий или снижается их устойчивость.

Необходимо периодически самостоятельно смазывать машинным маслом механизм складывания, подвижные и съемные части коляски.

Уход за изделием и дезинфекция

Чтобы максимально продлить срок службы кресел-колясок Barry, следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Очистите металлические элементы влажной мягкой салфеткой. При этом может использоваться мягкое чистящее средство.
- При загрязнении кресел-колясок, по возможности, немедленно сотрите влажную грязь и тщательно, досуха, вытрите кресло-коляску.
- При уходе за креслами-колясками Barry не рекомендуется использовать спиртосодержащие, абразивные чистящие средства и средства с красителями, а также проводить обработку с помощью жестких щеток.
- Перед использованием другим пациентом кресла-коляски необходимо протереть или продезинфицировать.

Ремонт, техническое и сервисное обслуживание данного Изделия могут выполняться в специализированных сервисных центрах. Актуальные адреса специализированных сервисных центров доступны на сайтах www.barry-care.com и www.sims2.ru

Кресла-коляски Barry можно транспортировать любыми видами транспорта с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков.

Упакованные кресла-коляски Barry должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Срок хранения

Срок хранения кресла-коляски Barry: 5 лет

Срок службы

Кресла-коляски Barry рассчитаны на 5 лет безотказной службы при условии регулярного технического обслуживания согласно Руководству по эксплуатации, прилагаемому к каждому Изделию.

Утилизация

По истечении срока службы или порче кресла-коляски Barry, исключающих возможность ремонта, необходимо провести дезинфекцию Изделия и его утилизацию, согласно нормам СанПин 2.1.7.2790-10 и статье 23 Федерального закона «Об обращении медицинских Изделий».

В случае утилизации кресел-колясок Barry пластиковые и металлические части должны быть отделены друг от друга.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа Изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

При обнаружении брака или несоответствия Изделия, претензии принимаются уполномоченным дистрибьютором производителя в РФ - ООО «СИМС-2» по адресу:

Фактический адрес (и для доставки через курьерские и транспортные компании): г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5.

Адрес для отправки Почтой России:

125430, г. Москва, а/я 11, получатель ООО «СИМС-2».

Артикул № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное Изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Производитель: Valentine International Ltd, Тайвань (Китай).

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, ул. Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90

www.sims2.ru

Регистрационное удостоверение

1) РЗН 2015/3412 от 14 декабря 2015 года

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственность за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.